


# Guía rápida de emparejamiento Bluetooth®

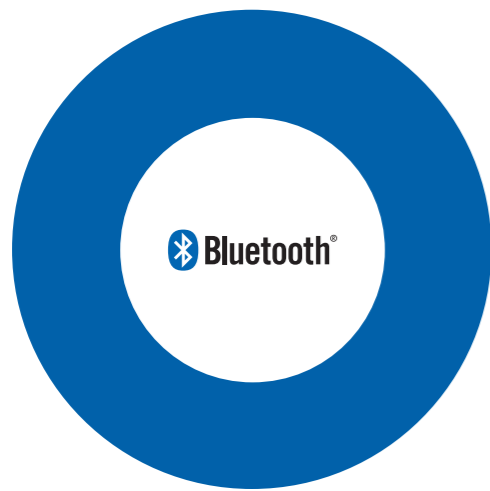

GLUCOCARD®

## Lea esto primero

- Es posible que algunos teléfonos inteligentes, especialmente los que no han sido evaluados o aprobados por el fabricante, sean incompatibles con su medidor. En App Store (Apple) y Google Play (Android) encontrará una lista de teléfonos inteligentes compatibles.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del medidor y los teléfonos inteligentes.
- Parte del contenido podría variar respecto a sus dispositivos, según la región, el teléfono inteligente o la versión de ARK Care® VITA.
- Es posible que la aplicación para dispositivos móviles ARK Care VITA no sea compatible con todos los teléfonos inteligentes.
- La aplicación ARK Care VITA está sujeta a actualizaciones y puede que algunas de sus funciones dejen de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene preguntas sobre la aplicación, póngase en contacto con el servicio técnico de atención al cliente de ARKRAY: 800.566.8558, 24 horas del día, 7 días de la semana.
- Para garantizar un uso seguro y correcto, lea el manual del usuario del medidor antes de usar el dispositivo.

1

## Consejos para el uso de Bluetooth®

- Para evitar problemas al conectar su medidor con un teléfono inteligente, acerque los dispositivos entre sí.
- Asegúrese de que el medidor y el otro dispositivo Bluetooth® estén dentro del alcance de la conexión (32 pies [10 metros]).
- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el medidor y el teléfono inteligente. Si hay obstáculos entre los dispositivos, puede que se reduzca la distancia de funcionamiento.

### NOTA

- Asegúrese de que Bluetooth® esté activado antes de ingresar al menú de conexiones Bluetooth®.

2

## Descarga de la aplicación para dispositivos móviles ARK Care VITA

ARK Care VITA se encuentra en Google Play o App Store.

1. **Teléfono inteligente** Abra la tienda de aplicaciones.
2. **Teléfono inteligente** Busque la aplicación ARK Care VITA.
3. **Teléfono inteligente** Descargue e instale la aplicación.



3

## OPCIÓN 1

### Emparejamiento del medidor con el teléfono inteligente durante la inscripción

Empareje el medidor con el teléfono inteligente para enviar los resultados de sus pruebas a ARK Care VITA a través de una conexión inalámbrica Bluetooth®.

1. **Teléfono inteligente** Active **Bluetooth®**.
2. **Teléfono inteligente** Inicie **ARK Care VITA**
3. **Teléfono inteligente** Toque **Sign Up** (Inscribirse)
4. **Teléfono inteligente** Siga los pasos de la aplicación para crear su cuenta.

Siga los pasos 5-7 en la página 6.

4

## OPCIÓN 2


### Adición de un nuevo medidor a una cuenta existente

1. **Teléfono inteligente** Telefono inteligente Active **Bluetooth®**
2. **Teléfono inteligente** Telefono inteligente inicie **ARK Care VITA**
3. **Teléfono inteligente** Telefono inteligente Toque **Profile→My Meters→+**

Siga los pasos 5-7 en la página 6.

5

5. **Teléfono inteligente** Ingrese el número de serie (situado en la parte posterior del medidor de glucosa en sangre GLUCOCARD® Shine Connex) en la aplicación ARK Care VITA. Ingrese solo el número de serie de 12 caracteres. Vea el ejemplo siguiente.

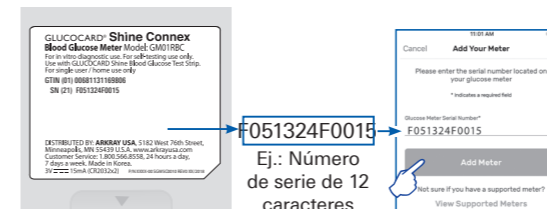

6. Toque YES para emparejar el medidor con el dispositivo móvil.

7. Siga los pasos de la aplicación para llevar a cabo el proceso de emparejamiento.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte del fabricante se hace en virtud de una licencia. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Apple, el logotipo de Apple e iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

6

Servicio técnico de atención al cliente de ARKRAY: **800.566.8558**, 24 horas del día, 7 días de la semana.

En caso de emergencia, comuníquese con su profesional de la salud o el personal de respuesta médica de emergencia.

DISTRIBUIDO POR:  
**ARKRAY USA**  
 5182 West 76th Street  
 Minneapolis, MN 55439 EE. UU.  
 800.566.8558  
 www.arkrayusa.com

© 2018. Reservados todos los derechos.  
 N.º de ref.: 5526-00; Rev. 01/19  
 PGUAB-0000015 Rev. 0 01/2019